

For better dentistry


DENTSPLY

Auswechseln des Arbeitsteiles

AutoMate® III oder Dual Torque

Matrizenspanner

1. Das auszuwechselnde Arbeitsteil an dem Metallring mit den Fingern oder einer kleinen Zange fixieren,
2. Griff gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen und
3. Neuen Einsatz einsetzen und nur mit den Fingern festdrehen.

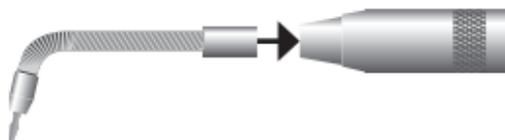

Caution, consult instructions for use



© 2009
DENTSPLY International

Manufactured by
DENTSPLY Caulk
38 West Clarke Avenue
Milford, DE 19963 USA
www.dentsply.com



DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
www.dentsply.de