



Technische Kenndaten

Vorgesehene Verwendung	Zahnsteinentfernung				
Gebrauchsanweisungen	Supraringivale Zahnsteinentfernung				
Beschreibung	Supraringivale Zahnsteinentfernung bei einfachen Fällen				
Ansatztyp	Glatt				
Allergener Faktor	Gemäß der Norm ASTM F899 - 12b aus rostfreiem chirurgischen Stahl gefertigter Ansatz Rostfreier chirurgischer Stahl enthält: <ul style="list-style-type: none"> • Nickel • Chrom 				
Handelsbezeichnung	Nr. 1 : F00246				
Medizinische Klasse	Gemäß europäischer Richtlinie 93/42/EWG ist das Medizinprodukt in Klasse IIa eingestuft.				
Einstellungen	Newtron-Reihe	P5-Reihe	Suprasson P5 Booster	Prophy Max - P-Max - Implant Center 2 - Piezotome 2	
	14	14	10	5	

Lebensdauer

Da die Bestimmung einer Höchstzahl von Einsätzen nicht möglich ist (dies hängt von zahlreichen Parametern wie Benutzungsdauer, Gewebefestigkeit, ausgeübte Kraft, Verschleiß usw. ab), ist es empfehlenswert, häufig benutzte Medizinprodukte mindestens einmal im Jahr auszutauschen. Das Medizinprodukt ersetzen, wenn Der Ansatz vibriert nicht bei der erwarteten Frequenz, die Behandlung läuft nicht wie gewöhnlich ab und benötigt mehr Zeit oder schreitet nicht voran.


Verbundene Unterlagen

Name des Dokuments	Referenzen
Abfrageweise der elektronischen Gebrauchsanweisungen	J00007
Protokolle für die Reinigung, Desinfizierung und Sterilisation von Ansätzen	J02003
Klinisches Datenblatt Zahnsteinentfernung	J08013
Tabelle zur Einstellung der Leistung der Ultraschallgeneratoren	J58000
Allgemeine Anleitung für die gesamte Reihe der konventionellen Dentalansätze	J02103


Sterilisation




Vor dem Gebrauch sterilisieren

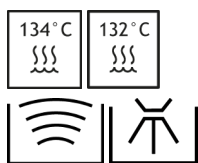


Der Ansatz muss vor und nach jedem Gebrauch desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden. Vor jeglichem Gebrauch, siehe die Protokolle für die Reinigung, Desinfizierung und Sterilisation von Ansätzen J02003.

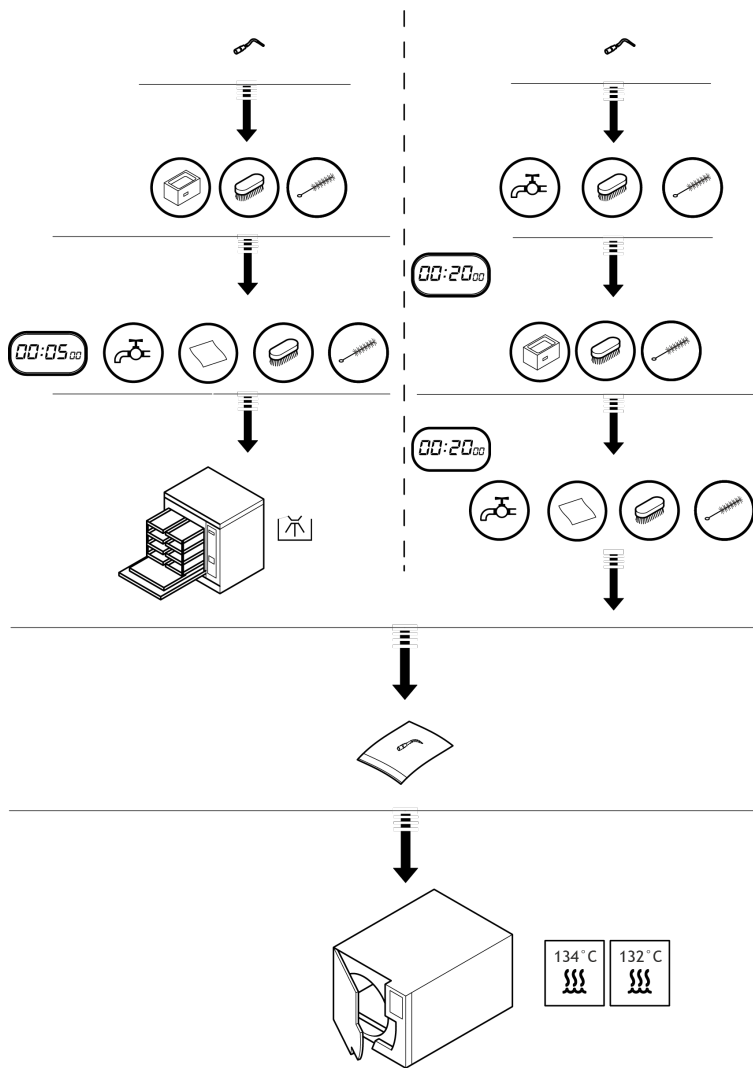

Installation

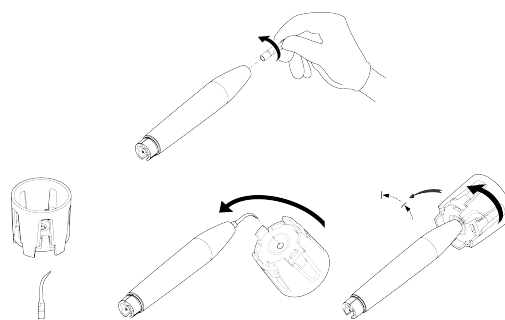

Ausbau

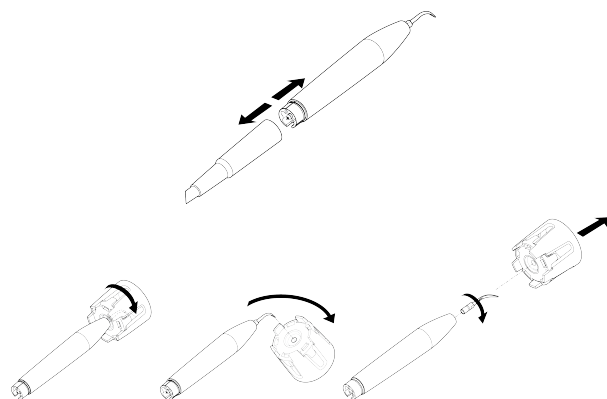

Identifizierung des Herstellers



SATELEC
 A Company of ACTEON Group
 17, avenue Gustave Eiffel
 BP 30216
 33708 MERIGNAC cedex
 Frankreich
 Tel. +33 (0) 556.34.06.07
 Fax +33 (0) 556.34.92.92
 E-Mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com



Datum der ersten Anbringung der CE-Kennzeichnung

1998



Der Zahnarzt muss den Zustand der Behandlungsstelle ständig beobachten, um Erhitzungsrisiken unverzüglich

Ansatz | Nr. 1 | J00103 | (98) | V2 | 05/2018 | NB01DE390B

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group
 17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANKREICH
 Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax +33 (0) 556 34 92 92
 E-Mail: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download



Instructions For Use

