

Reinigung und Austausch der Spannzange



Stellen Sie sicher, dass Sie die Steuereinheit vor der Wartung ausschalten. Anderenfalls kann es zu Verletzungen und Beschädigungen kommen.

Um die Leistung und Sicherheit des Produkts sicherzustellen, wird empfohlen eine regelmäßige Reinigung durchzuführen und die Spannzange mindestens einmal wöchentlich zu reinigen.

Demontage der Spannzange

1. Drehen Sie den Schnellspannverschluss im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in die Open Position bis ein deutliches Klicken zu hören ist (Abb.1)
2. Legen Sie den Transportaufsatz ein der im Lieferumfang enthalten ist



3. Mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel und der dreieckigen Öffnung drehen Sie das Spannfutter entgegen dem Uhrzeigersinn auf (Abb.2)



4. Entfernen Sie die Spannzange (Abb.3)

Reinigen der Spannzange

5. Die entnommene Spannzange von groben Verunreinigungen befreien, darauf achten dass die drei Schlitze der Spannzange frei sind, gegebenenfalls reinigen (z.B. mit einem Ultraschallreiniger.)

Montage der Spannzange

6. Sprühen Sie ein wenig Service Öl in die Spannzange
7. Führen Sie die Spannzange in den Schaft des Handstücks ein
8. Drehen Sie die Spannzange von Hand im Uhrzeigersinn ein (Abb.4)
9. Nehmen Sie den Schraubenschlüssel und ziehen Sie die Spannzange handfest an bis ein leichter Widerstand spürbar ist (Abb.5)

Abb. 1

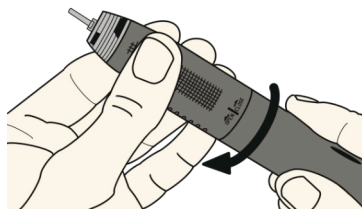


Abb. 2



Abb. 3

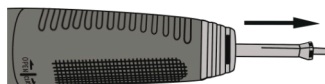


Abb. 4


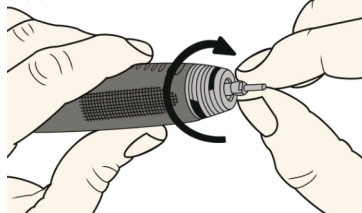


Abb. 5

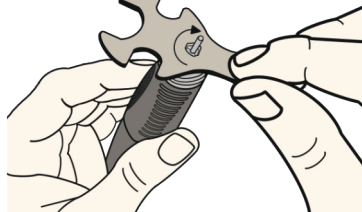

Längeres Ausbleiben der Wartung kann einen höheren Verschleiß der Spannzange bewirken und die Sicherheit beeinträchtigen, was dazu führt, dass die Einsätze während dem Arbeitsvorgang aus der Spannzange auslaufen können.