



ROCKTABS

M+W Dental Gebrauchsanweisung

Stand: 270917

Hochreaktives Bindemittel für Dentalgipse und phosphatgebundene Einbettmassen im Gipsabscheider. Verhindert die Verstopfung der Abflüsse, reduziert unangenehme Gerüche und erleichtert die Reinigung des Abscheiders.

Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen 15 und 40 % der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsauffangbecken nicht ab und führen über kurz oder lang zu Rohrverschlüssen.

Eine Tablette pro Woche genügt und nur noch klares Wasser fließt ab.

Anwendung:

M+W Rocktabs einfach nach der Entleerung mit dem mitgelieferten Dosierkorb im Gipsabscheider einhängen (bei Mehrkammerabscheidern vorzugsweise am Überlauf zur zweiten Kammer) so, dass die Pille vollständig unter der Wasseroberfläche liegt und dem gipsbelasteten Wasserzufluss nicht direkt ausgesetzt ist. Schon bald setzt M+W Rocktabs seine Wirkstoffe frei. Auch feinste Gipsschwebstoffe werden ausgeflockt und sinken zu Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.

M+W Rocktabs ist umweltfreundlich

Wussten Sie, dass Sie maximal 400 mg Gips pro Liter Wasser in die Kanalisation einleiten dürfen, weil Gips Beton angreift? Mit M+W Rocktabs sind es nur noch wenige Milligramm. M+W Rocktabs sind nicht kennzeichnungspflichtig, in der Handhabung neutral und unschädlich. Die Wirkstoffe von M+W Rocktabs erfüllen selbstverständlich die gültigen Abwasserwaltungsvorschriften.

Abscheiderreinigung kinderleicht

Mit M+W Rocktabs beugen Sie der Plattenbildung vor. Und wo nichts verhärtet, gibt's auch nichts zu spachteln.

Hygienisch und geruchsfrei

Wer eine Nase für Probleme hat, wird seine Freude haben, weil sauberes Wasser nicht riecht und Schwebstoffe gebunden sind.

Doch Disziplin muss sein:

Getränkereste und Seifenlauge gehören nicht in Ihren Abscheider!

Liefergebände (immer inklusive eines Dosierkorbs):

REF 093 969 2 Stück

REF 093 970 10 Stück

REF 093 971 25 Stück

Letzte Überarbeitung: 27.09.2017

M+W Dental

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88