



FISSURENVERSIEGLER

Návod k použití

Cílová skupina pacientů

Děti, dospívající, dospělí a starší pacienti

Určený uživatel

Zubní lékař

Složení

Kvalitativní údaje: Oligomerní metakrylát, fluorid sodný, kafrchinon, anorganická plniva
Kvantitativní údaje v hmotn. %: Metakrylát 79, anorganická plniva 20, fluorid sodný 1

Účel použití výrobku

M+W Select Fissurenversiegler je světlem vytvrzovaný kompozit určený k pečetění fisur.

Indikace

M+W Fissurenversiegler je světlem vytvrzující kompozit s fluoridem pro utěsnění fisur. Jedná se o pecetidlo pro okluzní plochy za účelem profylaxe zubního kazu.

Kontraindikace

Materiál obsahuje metakrylát.

Nepoužívejte u pacientů se známou alergií na některou ze složek.

Funkční vlastnosti výrobku

Kompozitní materiál tvrdne ozařováním světlem.

Zvláštní preventivní opatření

žádné

Použití

1. Povrch důkladně vycistete a naneste na něj leptací gel (M+W Big-Etch, M+W Appli-Etch) (kyselina orthofosforečná), jehož modrá barva usnadňuje přesnou a rovnomernou aplikaci. Nechte leptací gel 60 sekund pusobit. V případě skloviny na zubech dospívajících zkratete dobu leptání na cca 30 sekund, v případě skloviny bez prízmat nebo fluorizované zubní skloviny prodlužte dobu leptání na cca 120 sekund. Následně důkladně opláchnete dostatečným množstvím vody. Povrch určený k pečetění dobře vysušte. Leptané zubní povrchy by mely být mléčne až křídově bílé. Po osušení dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s tekutinami.

2. Naneste pouze 1 kapku pecetidla M+W Fissurenversiegler míchací blok a štetecem naneste tenkou vrstvu na leptané plochy. Následně polymerizujte halogenovou lampou po dobu 20–30 sekund. Po použití nádobku pečlivě uzavrete.

Varování

Zbývající rizika

Vždy dodržujte pokyny pro zpracování a bezpečnostní opatření popsaná v návodu k použití výrobku. Pokud by i přes dodržování těchto pokynů došlo k nežádoucí reakci u pacienta nebo k jiným nežádoucím událostem, prosíme každopádně o nahlášení takové události a co nejpresnější popis průvodních okolností.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky tohoto zdravotnického prostředku jsou při správném zpracování a použití velmi vzácné. Pokud byste zaznamenali nějaké nežádoucí účinky, prosíme každopádně o nahlášení takové události a co nejpresnější popis průvodních okolností a symptomů, a to i ve sporných případech. Všechna upozornění sledujeme. Rizika při předávkování nejsou známa.

Vzájemné působení

Interakce přípravku jinými zdravotnickými prostředky, léčivými přípravky nebo jinými látkami není známa.

Skladování

Výrobek by měl být skladován při teplotě 0 °C - 22 °C.

Doba použitelnosti

Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti.

Varianty

 200 135 M+W Select přípravek k pečetění fisur, bílý

2 injekční stříkačky po 2,0 ml + kanyl

Likvidace

Nepoužitý materiál lze likvidovat vytvrzený nebo nevytvrzený jako metakrylátový odpad.

Všechny závažné nežádoucí příhody související se zdravotnickým prostředkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště či sídlo.

Használati útmutató

Pácienscélsoport

Gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősebb páciensek

Célfelhasználó

fogorvos

Összetétel

Minőségi információk: oligomerek metakrilátok, nátrium-fluorid, kámforkinon, szervetlen töltőanyagok
Mennyiségi információk tömeg%-ban: metakrilátok: 79, szervetlen töltőanyagok: 20, nátrium-fluorid: 1

A termék rendeltetése

Az M+W Select Fissurenversiegler a barázdák lezárására szolgáló fényrekötő kompozit.

Indikáció

Az M+W Fissurenversiegler egy fluoridtartalmú, fényre keményedo barázdazáró kompozit. Az okkluzális felületek cariesprevenciósz barázdazárására alkalmazható

Ellenjavallatok

Az anyag metakrilátokat tartalmaz.

Ne használja olyan pácienseknél, akik ismertem allergiásak az összetevőkre.

A termék teljesítőképességének jellemzői:

A kompozit anyag fényvel való besugárzás hatására keményedik ki.

Különleges óvintézkedések

Nincsenek

Alkalmazás

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet és fedje be marógéllal (M+W Big-Etch, M+W Appli-Etch) (ortofoszforsav). A gél kék színe segíti a pontos és egyenletes felvitelt. Hagyja hatni a marógélt 60 mp-ig. A marási idő fiatal fogak zománca esetén kb. 30 mp-re csökkentse, míg a prizmaszegény vagy fluoridált zománcok esetén 120 mp-re hosszabbítsa meg. Elegendó vízzel alaposan öblítse le a felületet. A lezárandó felületeket hagyja megszáradni. A lemart fogfelületeknek teljes-meszes fehérnek kell lenniük. A száradás után ki kell zárni a folyadékokkal történő érintkezést.

2. Csak 1 csepp M+W Fissurenversiegler cseppentsen a keveroblokra, majd egy esettel vékony rétegben vigye fel az egész mara-tott felületre. Ezután egy halogénlámpával 20-30 mp-ig keményítse. Használat után gondosan társa le.

Figyelmeztetések

Fennmaradó kockázatok

Minden esetben kövesse a termék használati utasításában található alkalmazási utasításokat és eloirt óvintézkedéseket. Ha ezen utasítások betartása ellenére a paciensenél nem kívánt reakció alakul ki, vagy más nem kívánt hatás lép fel, kérjük, minden esetben jelelenség, illetve a körülmények minél pontosabb megadása mellett jelezzze ezt.

Mellékhatások

Szakzerű megmunkálás és használat esetén nemkívánatos mellékhatások a jelen orvostechnikai eszköz esetében rendkívül ritkán fordulnak elő. Ha nemkívánatos mellékhatásokról értesül – kétséges esetekben is –, kérjük, minden esetben jelezzze a kísérő körülmények és a tünetek lehető legpontosabb megadásával. Minden bejelentést kivizsgálunk. Túladagolás esetén nincsenek ismert kockázatok.

Kölcsönhatások

A termék kölcsönhatásai más orvostechnikai eszközökkel, gyógyszerkészítményekkel vagy egyéb anyagokkal nem ismertek.

Tárolás

A terméket 0 °C - 22 °C-on kell tárolni.

Minőségmegőrzési idő

Ne használja a lejáratú idő után.

Változatok

 200 135 M+W Select barázdazáró anyag, fehér

2 fecskendő x 2,0 ml + kanyl

Ártalmatlanítás

A fel nem használt anyag kikeményítve vagy kikeményítetlenül, metakrilát hulladékként ártalmatlanítható.

Minden, a termék használatával kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.



Achtung
Warning

H315 drázdí kűži **H 319** zpűsobuje zážné poškození očí




Achtung
Warning

H315 provoca irritazione cutanea **H319** provoca grave irritazione agli occhi

Made in Germany



Letzte Überarbeitung/latest revision/dernière révision/ultima revisione/poslední revize/utolsó módosítás: 13.06.2023

 dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH · Schusterring 35 · 25355 Barmstedt/Germany



Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40 · 63654 Büdingen/Germany · Tel.: +49 (0) 60 42 - 88 00 88