

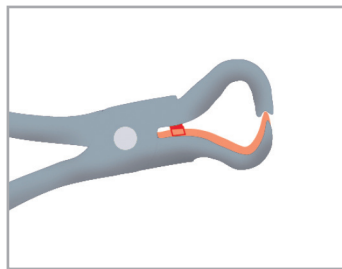
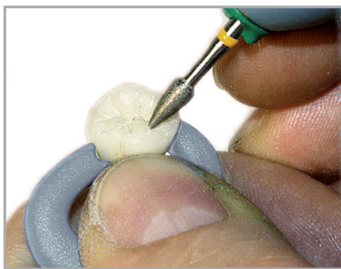




- Ⓓ – der Kronenhalter verhindert Verletzungsgefahr
 - temperaturbeständig bis 220°C (430°F)
 - Diaduran, der biegeefeste, hochhitzebeständige Kohlefaserwerkstoff
- Ⓔ – the crown holder, prevents accidental injury!
 - heat resistant up to 220°C (430°F)
 - Diaduran, the bend resistant, heat resistant fibre-glass plier
- Ⓕ – le porte-couronne, prévient le risque de blessure!
 - réfractaire de 220°C (430°F)
 - Diaduran, fibre de carbone micro chargée avec des minéraux résistants à la chaleur et incassable
- Ⓖ – Il sostegno per corone previene ferite accidentali
 - Resistente al calore, fino a 220°C (430°F)
 - Diaduran, la pinza in fibra di vetro resistente alla flessione ed al calore
- Ⓒ – držák korunky chrání před poraněním
 - odolný až do teploty 220 °C (430 °F)
 - diaduran, materiál z uhlíkových vláken pevný v ohybu a odolný vůči vysokým teplotám
- Ⓗ – a koronartartó megakadályozza a sérülésveszélyt
 - 220°C-ig (430°F) hőálló
 - Diaduran, a nagy hajlítószilárdságú, hőálló szén-szál anyag

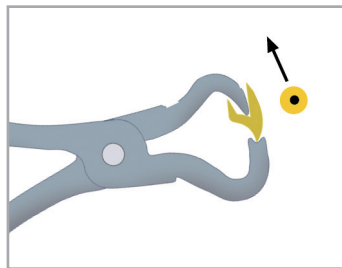



Bei Abnutzung der Arbeitsenden Distanz-Stift abräsen
 For a tighter fit, simply reduce the size of the knob
 Lorsque les embouts de la pince sont usés, meuler la butée
 Per una presa più salda basta ridurre la misura della manopola
 Po opotrebování pracovních konců odstraňte frézku distanční kolík
 A munkavégek kopása esetén a távtartó stift frézélése szükséges

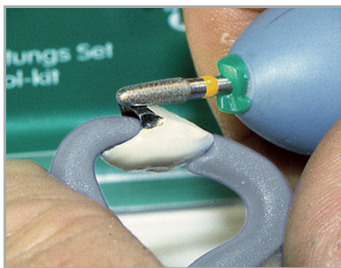

Zum exakten Beschleifen, Finieren und Polieren der Zervikalränder
 For the exact smoothing, finishing and polishing of the margins
 Pour la finition des bords cervicaux
 Per levigare, rifinire e lucidare i margini con precisione
 K přesnému broušení, vyhlazování a leštění krčkových okrajů
 A cervikális peremek pontos csiszolásához, finírozásához, polírozásához

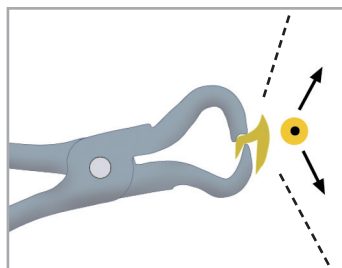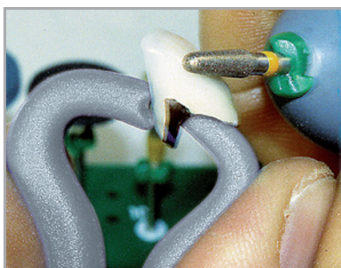

Zum exakten Strukturieren und Bearbeiten der Labial- und Inzisalfächen von Einzelkronen
 Use this hold for the precise finishing of labial or incisal surfaces
 Pour structurer et travailler les surfaces labiales et incisales
 Utilizzare questa presa per la finitura di precisione delle superfici vestibolari o incisali
 K exaktnímu strukturování a opracování labiálních a incizních plošek samostatných korunek
 Az egyes koronák labiális és incizális felületeinek pontos strukturálásához és kidolgozásához

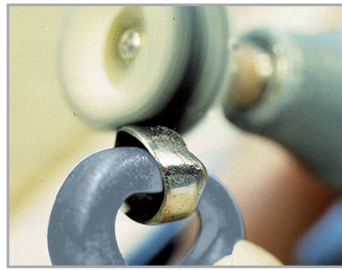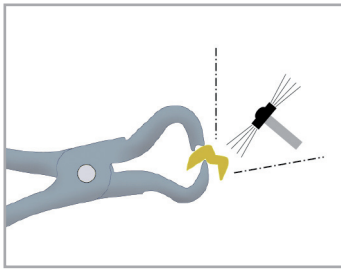

Freie Bearbeitungsmöglichkeit an der gesamten Okklusalfläche bei seitlicher, bukkaler Fixierung



Makes it possible to work on the entire occlusal surface

Toute la surface occlusale est accessible car la couronne est tenue par la surface buccale.

Rende possibile il lavoro sull'intera superficie occlusale

Volný přístup k oprávnění po celé okluzní ploše při boční, bukkální fixaci

Szabad kidolgozási lehetőségek a teljes okkluzális felületen oldalsó, bukkális fixálás mellett

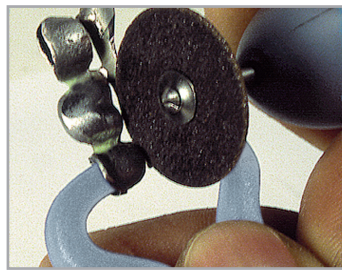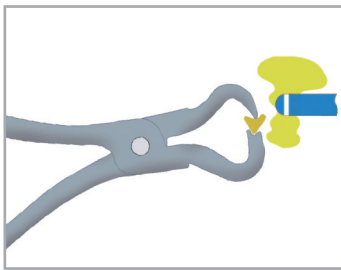

Leichte Fixierung zur Bearbeitung von Inlays



Easy positioning of inlays

Facilité de tenue pour travailler les inlays

Agevola il posizionamento degli intarsi

Snadná fixace při úpravách inlejí

Könnyű fixálás az inlay kidolgozásához

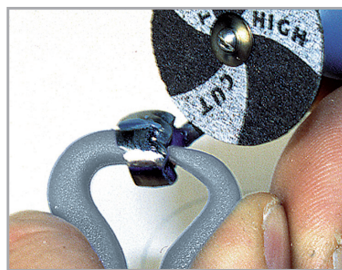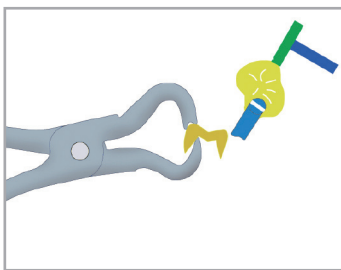

Ideale Halterung zum Abtrennen und Beschleifen von Gusskanälen


The ideal tool for holding bridges or crowns while separating sprilles with a disc

La fixation idéale pour couper les liges de coulée

Strumento ideale per trattenere ponti o corone durante la rimozione dei perni di fusione con un disco

Ideální přidržování při oddělování a broušení litých kanálků

Ideális tartás az öntőcsatornák leválasztáshoz és csiszolásához

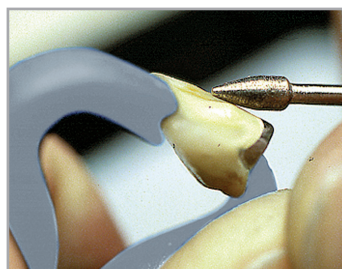

Gegenüberliegendes Arbeitsfeld durch Drehen der Krone



Work on the entire crowns by simply turning the plier

Champ d'activité opposé couronne dentée

Campo di lavorazione attuale

Možnost práce na protilehlé straně otočením korunky

Átellenes munkaterület a korona elforgatásával

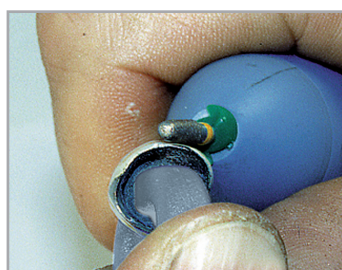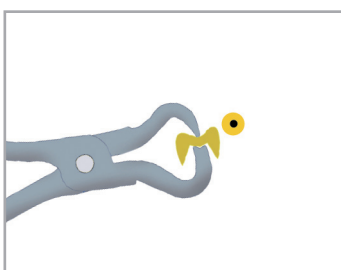

Wesentliche Erleichterung zum Beschleifen und sauberen Polieren der Zervikalränder von Molaren-Kronen



Provides relative ease for smoothing and polishing the margins of molar crowns

Le maintien par le milieu est la fixation idéale pour l'utilisation des meules en caoutchouc et des polisseurs

Semplifica la levigatura e la lucidatura dei margini delle corone per i molari

Výrazné ulehčení práce při broušení a čistém leštění cervikálních okrajů korunek na moláry

Lényegesen könnyebb csiszolás és tisztább polírozás a moláris koronák cervikális peremeken

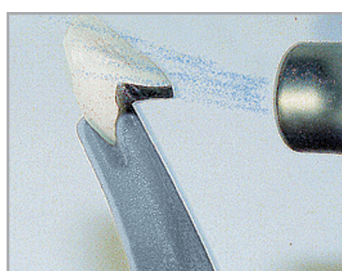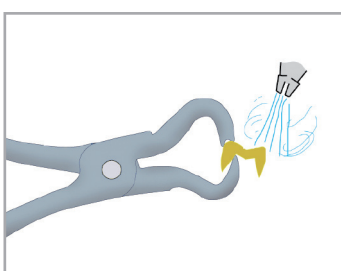

Einklemmen von Einzelkronen (Prämolaren, Incisiven o.ä.) zum Strukturieren, Abdampfen, Polieren u.a.

The groove in the handle of the plier makes it possible to work on a single crown. Place crown in the groove provided for finishing, dust off, polish

Permet la fixation des couronnes unitaires (prémolaires, incisives, ...) pour structurer, nettoyer à la vapeur ou polir

Il solco sull'impugnatura della pinza rende possibile il lavoro su corone singole. Porre la corona nell'apposito solco per rifinire, ripulire e lucidare

Upevnění samostatných korunek (na premolárech, řezácích apod.) ke strukturování, odpařování, leštění apod

Az egyes koronák becsipetése (premolárisok, incizívák) strukturaláshoz, gőzmosáshoz, polírozásához