

## Becht4care®

Alkoholisches Händedesinfektionsgel

### Anwendungsbereich

Alkohohlhaltiges, antiseptisches Gel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Das Produkt findet als hygienische Händedesinfektion in Krankenhäusern, Einrichtungen des Gesundheitswesens, öffentlichen und gewerblichen Betrieben, Lebensmittelindustrie, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie, Tierarztpraxen und im Haushalt Anwendung.

### Anwendung

Das Gel wird unverdünnt auf die Handfläche aufgetragen.

Hygienische Desinfektion (EN 1500):

Erfolgt durch Verreiben des Gels (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 30 sec

Chirurgische Desinfektion (EN 12791):

Erfolgt durch Verreiben des Gels mit der erforderlichen Einwirkzeit von 5 min, aufgeteilt in zwei Dosen á 3 ml

### Wirkungsspektrum

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) in 30 sec (EN 1040/ 13727)
- wirkt levurozid in 30 sec (EN 13624/1276)
- wirkt tuberkulozid (M.terrae) in 1 min (EN 14348)
- wirkt begrenzt viruzid in 1 min (DGHM)

### Weitere Eigenschaften

- klar und farblos
- angenehm duftend
- hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- sehr hautfreundlich
- schützt und pflegt die Haut ohne auszutrocknen
- wird schnell absorbiert
- enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe
- nach der Anwendung ist kein Abspülen notwendig
- frei von Phenolen und Aldehyden
- dermatologisch getestet mit Note „sehr gut“
- pH-Wert: 5,5 – 7,0



### Zusammensetzung des Gels

100 g Gel enthalten:

- 66 g Ethanol

### Haltbarkeit

36 Monate

### Lieferform

REF 525.100	100 ml Flasche (PZN 15262243)
REF 525.500	500 ml Flasche (PZN 15262237)
REF 525.1	1 liter Flasche
REF 525.5	5 liter Kanister

### Hersteller

Alfred Becht GmbH  
Carl-Zeiss-Str. 16  
D-77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 60586-0  
Fax.: +49 781 60586-40  
[www.becht-online.de](http://www.becht-online.de)

## Becht4care®

Alkoholisches Händedesinfektiongel

---

### Lagerung

Behälter dicht verschlossen und unter Verschluss an einem gut belüfteten und trockenen Ort aufbewahren. Kühl lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Getrennt von starken Oxidationsmitteln und Säuren lagern.

### Zur Beachtung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Gebrauch nur durch Fachpersonal. Die Chargennummer (LOT) sollte bei jedem Vorgang, der eine Identifikation des Produktes verlangt, angegeben werden. Nach Anbruch 1 Jahr haltbar.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nach Anwendung ist kein Abspülen notwendig.

BauA-Nr.: N-77702