

# Veracia SA ANTERIOR & POSTERIOR

**Q<sup>3</sup>** : Quick Quality Quartet  
**PACK** TIME SAVING!

Exzellente Ästhetik  
Erhebliche Zeitersparnis




# Eine Idee wird Realität

## Alters- und funktionsgerechte Prothetik mit hohem Tragekomfort

Bei der Entwicklung der semi-anatomischen Veracia SA Front- und Seitenzähne wurde erstmals die Abnutzung verbleibender natürlicher Zähne berücksichtigt.

Sie sind aus der Vorlage der vollanatomischen Veracia Zahnlinie entstanden. Hierbei hat man die funktionellen Charakteristika der Veracia Zähne belassen und an exakt vorbestimmten Sektoren mit Abrasionsbereichen versehen.

Das Ergebnis sind eine deutlich bessere Kauleistung, ein angenehmer Tragekomfort der stabilisierten Prothese und wesentlich weniger Stress für das Kiefergelenk.

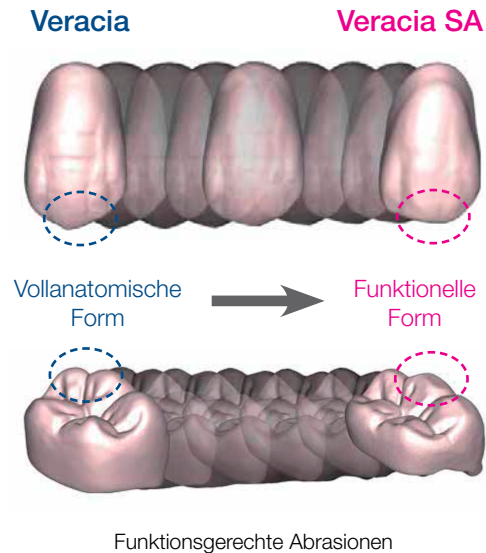

## Systemübergreifende Aufstellungen für alle gängigen Okklusionskonzepte

Mit Veracia SA sind Sie an kein Okklusionskonzept gebunden. Durch den klaren okklusalen Aufbau, die effektive zentrale Okklusion sowie die gezielt eingearbeiteten Abrasionsbereiche lassen sich die Seitenzähne gegenseitig leicht und eindeutig aufstellen.

- Balancierte Okklusion
- Lingualisierte Okklusion
- Zahn-zu-Zahn-Okklusion
- Zahn-zu-zwei-Zahn-Okklusion



Balancierte Seite




Arbeitsseite

## Einzigartiges Kauflächendesign mit physiologischen Freiräumen


Die Okklusionsareale der Veracia SA Seitenzähne sind gezielt in funktioneller Bewegungsrichtung des Unterkiefers um konkave Freiräume erweitert. Die zentrischen Stopps der vollanatomischen Seitenzähne wurden belassen und direkt daneben um entsprechende Freiräume ergänzt.

Diese Besonderheit ist eine ideale Ausgangssituation für die balancierte oder linguallisierte Okklusion, so dass nach der Aufstellung so gut wie keine Einschleifkorrekturen vorgenommen werden müssen.

Darüber hinaus erleichtern diese Freiräume den Patienten das Einfädeln in die statische Okklusion, und laterale Schubkräfte werden auf ein Minimum reduziert.

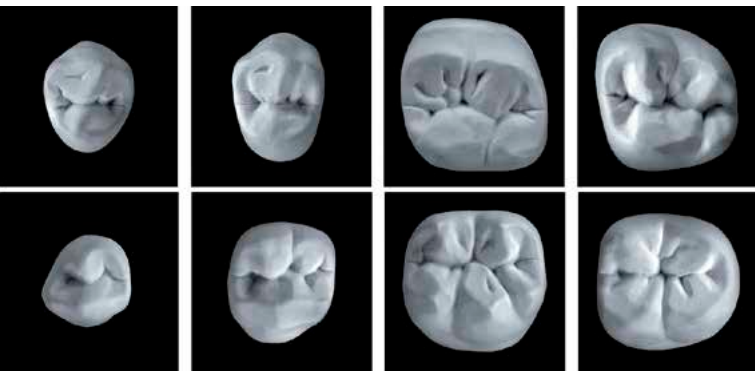


Tiefe okklusale Fissuren, kombiniert mit bewegungsspezifischen Schliiff-Facetten, schaffen eine klare und einfache Zuordnung bei der Aufstellung sowie eine effektivere Kauleistung der fertiggestellten Prothese.

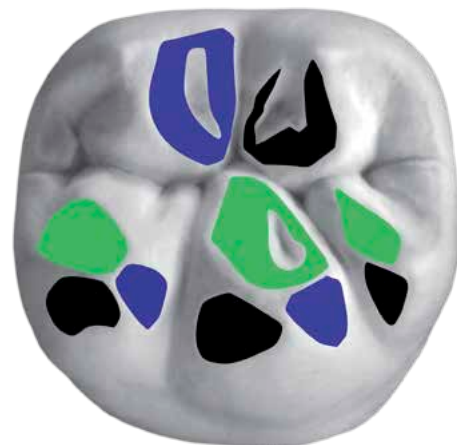

- Laterotrusion
- Mediotrusion
- Protrusion

## Zähne, die zueinander finden

Veracia SA unterstützt Ihre Effektivität bei der täglichen Herstellung prothetischer Arbeiten. Durch das einzigartige „Funktionsdesign“ erfolgt die Aufstellung der Seitenzähne praktisch wie von selbst.

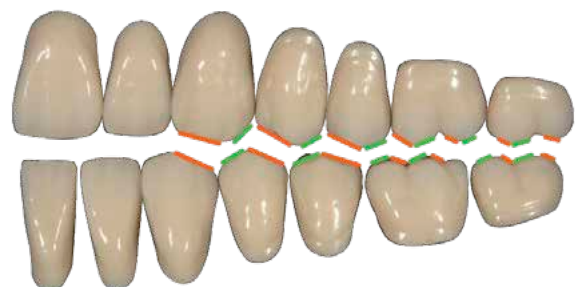

# Eins, Zwei, Q<sup>3</sup> Pack ... fertig!

## Exzellente Ästhetik und Funktion mit erheblicher Zeitersparnis


Das physiologische Design der Veracia SA Posteriorzähne ermöglichte die Entwicklung einer einzigartigen wachsfreien Garniturhalterung mit integrierter Aufstellhilfe – Q<sup>3</sup> Pack. Damit erreichen Sie erstmals eine mühelose Seitenzahnaufstellung mit immer gleichbleibend exzellenter Funktion und Anwendungssicherheit, unabhängig vom eingesetzten Artikulatorsystem.



Q<sup>3</sup> Pack reduziert die Aufstellzeit von acht Veracia SA Seitenzähnen auf wenige Minuten. Zeitintensive Vorbereitungen oder aufwändiges Equipment sind nicht erforderlich.

Q<sup>3</sup> Pack ist präzise und sichert die korrekte Kontaktbeziehung der Veracia SA Seitenzähne. Funktions- und Schleifkorrekturen werden auf ein Mindestmaß reduziert.

Q<sup>3</sup> Pack enthält einzelne Seitenzähne, die individuell in ihrer Position justiert werden können.

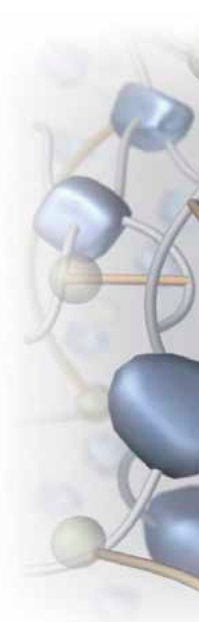

## Nur 3 Schritte zur funktionellen Aufstellung



1 Die Frontzahnaufstellung und Vorbereitung der Wachswälle erfolgt in gewohnter Weise. Die mesiale Aussparung von Q<sup>3</sup> Pack an den Eckzahn platzieren und distal zur Alveolarlinie ausrichten.



2 Die korrekte Position der Haltegriffe in horizontaler Ausrichtung zur Kauenebene überprüfen und die Zähne festwachsen.



3 Ein leichter Druck auf den Griff gibt die Aufstellung frei.





Fertig Die Interdentalräume mit etwas Wachs schließen ... fertig.



## Beste physikalische Eigenschaften durch MF-H Komposit-Technologie

Die Veracia SA Zähne bestehen, wie die bewährten vollanatomischen Zähne der Veracia Zahnlinie, aus mikrogefülltem Hybrid-Komposit (MF-H Micro Filled Hybrid Composite), verstärkt mit beschichteten Gläsern. Diese homogene Struktur erreicht beste physikalische Eigenschaften und eine hervorragende Beständigkeit.

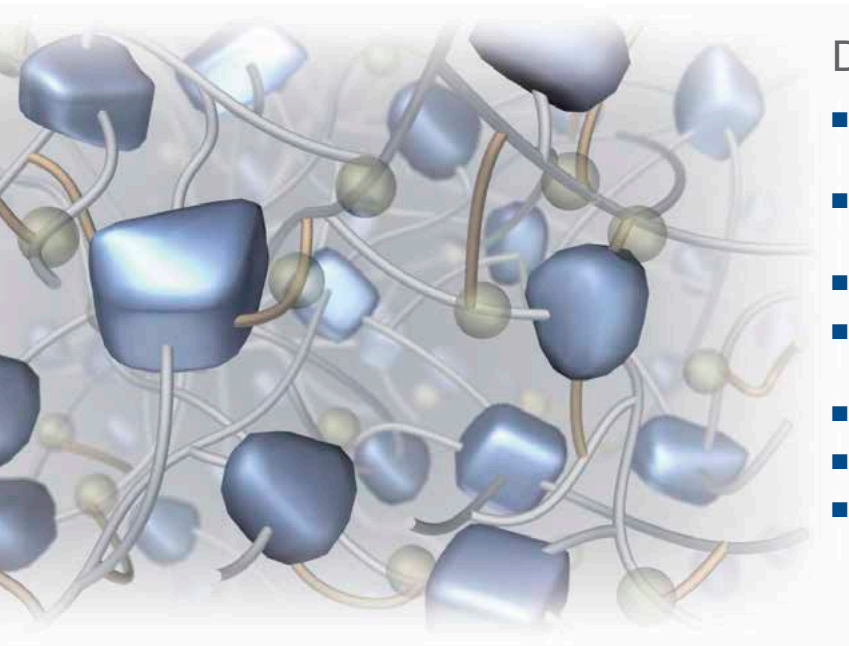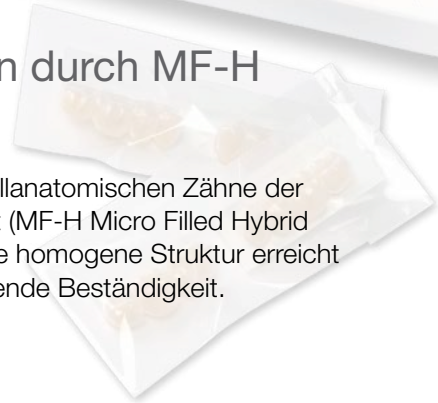

## Deshalb Veracia SA

- Alters- und funktionsgerechte Zahnformen
- Keine Bindung an ein Okklusionskonzept
- Zeitsparend bei der Aufstellung
- Balancierte Okklusion, allein durch die Aufstellung
- Hohe Anwendersicherheit
- Effiziente Herstellung im Dentallabor
- Gleichbleibende Qualität der hergestellten Prothesen

### EINFACH

Kein aufwändiges Equipment

### EFFIZIENT

Wachsfree Zahngarnitur = Aufstellhilfe

### SCHNELL

Keine zeitintensiven Vorbereitungen

### PRÄZISE

Immer korrekte Kontaktbeziehungen

### UNABHÄNGIG

Mit jedem Artikulatorsystem anwendbar

Durch die neue Art der Zahnaufstellung mit **Q<sup>3</sup> Pack** sparen Sie sofort wertvolle Zeit.



# Veracia SA Anterior

Moderne computerunterstützte Herstellungsverfahren gewährleisten eine immer gleichbleibende Symmetrie der linken und rechten Front- und Seitenzähne sowie eine dimensionstreue Größenzuordnung.






Quadratisch

S4	43,0 9,2 7,9	
S5	45,7 9,8 8,4	
S6	48,5 10,4 8,9	



Rechteckig

ST4	43,5 9,6 8,0	
ST5	46,3 10,2 8,5	
ST6	49,0 10,8 9,0	




Oval

O4	43,4 10,4 8,0	
O5	46,2 11,0 8,5	
O6	49,0 11,7 9,0	



Mehr abradiert

MA4	32,5 9,4 4,7	
MA5	34,6 10,1 5,0	
MA6	36,7 10,7 5,3	
MA7	38,8 11,3 5,6	

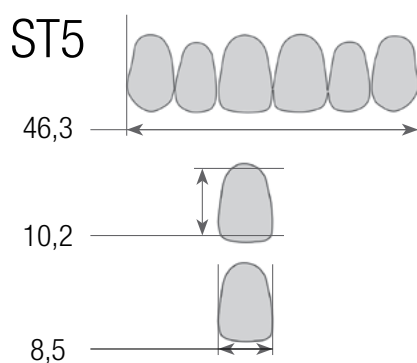





Die Front- und Seitenzähne sind in den VITA\* Classical Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und in der SHOFU Whitening-Farbe W1 erhältlich.


Q<sup>3</sup> Pack wird in den Farben A2, A3 und A3,5 angeboten.

# Veracia SA Posterior & Q<sup>3</sup> Pack





Die Veracia SA Posteriorzähne sind wahlweise als Garnitur auf einem Zahnblettchen oder als wachsfreies Q<sup>3</sup> Pack erhältlich.



S28	28,0		Veracia SA Posterior und Q <sup>3</sup> Pack
	8,7		
S30	30,0		Veracia SA Posterior und Q <sup>3</sup> Pack
	8,9		
S32	32,0		Veracia SA Posterior Q <sup>3</sup> Pack
	10,0		
S34	34,5		Veracia SA Posterior Q <sup>3</sup> Pack
	9,9		

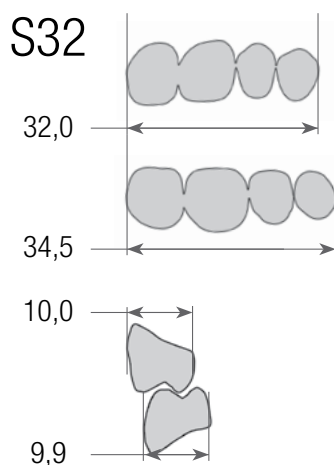

## Frontzahnempfehlungen OK/UK

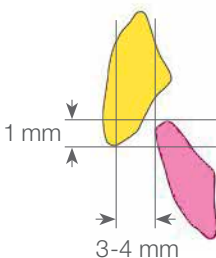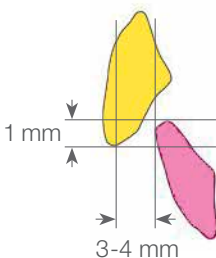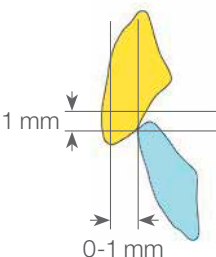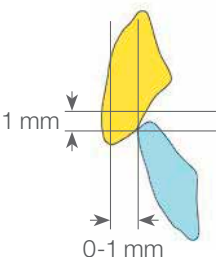Überbiss Vertikal		<b>OK</b>	S4	S5	S6
			ST4	ST5	ST6
			O4	O5	O6
Überbiss Horizontal		<b>UK</b>	MA4	MA5	MA6
Überbiss Vertikal		<b>OK</b>	S4	S5	S6
			ST4	ST5	ST6
			O4	O5	O6
Überbiss Horizontal		<b>UK</b>	MA5	MA6	MA7

Alle Maße in Millimeter

# Systemkomponenten



## Veracia SA - Posterior

1 Zahnform OK / UK in den Größen S28, S30, S32, S34



## Veracia SA - Posterior **Q<sup>3</sup> Pack**

1 Zahnform OK / UK in den Größen S28, S30, S32, S34



## Veracia SA - Anterior

3 OK-Zahnformen in den Größen 4, 5 und 6

- S (quadratisch)
- ST (rechteckig)
- O (oval)

1 UK-Zahnform in den Größen 4, 5, 6 und 7

- MA (mehr abradert)



## Veracia SA - 28 Teeth Set A2 / A3

1 Frontzahngarnitur OK (ST6)

1 Frontzahngarnitur UK (MA6)

Je 1 **Q<sup>3</sup> Pack** Seitenzahngarnitur (OK / UK Größe 32)

Best.-Nr. A2ST66 / A3ST66



## Veracia SA - AP Full Set

13 Frontzahngarnituren (9 OK / 4 UK)

6 Seitenzahngarnituren (S30, S32, S34:

3 OK / 3 UK)

Best.-Nr. FSA3

\* VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.



**SHOFU INC.** 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan ([www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp))  
**SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD.** 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 ([www.shofu.com.sg](http://www.shofu.com.sg))  
**SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.** No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China ([www.shofu.com.cn](http://www.shofu.com.cn))  
**SHOFU DENTAL CORPORATION** 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA ([www.shofu.com](http://www.shofu.com))  
**SHOFU UK** Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK ([www.shofu.co.uk](http://www.shofu.co.uk))  
**SHOFU DENTAL GmbH** Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany ([www.shofu.de](http://www.shofu.de))  
 SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.