



# ARTIKULATIONSGIPS

## NATUR

Inhalt: 20 kg

Stand: 27/09/17

Zum Einartikulieren zahntechnischer Arbeiten, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen und zum Herstellen von Frässockeln und Vorwällen.

- REF 093 928** weiß       **REF 193 980** mint  
 **REF 193 981** blau       **REF 193 982** terrakotta

### Verarbeitung:

Mischverhältnis

Artikulationsgips „Natur“ : dest. Wasser: 100 g : 40 ml

Verarbeitungstemperatur: 23 °C

### Pulver in das vorgelegte Wasser einstreuen.

Verarbeitungszeit: ca. 2,5 Min.

Mischdauer mechanisch unter Vakuum: 30 Sek.

Mischdauer manuell: 60 Sek.

### Physikalische Daten:

Erstarrungsende: ca. 4,5 Min.

Druckfestigkeit nach 1 Std.: mind. 15 N/mm<sup>2</sup>

Lineare Abbindeexpansion  
nach 2 Std.: max. 0,06 %

**MW Dental**

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88