

Bechtozid sensitive

Fertiglösung

Anwendungsbereich

Die quatfreie, gebrauchsfertige Schnell-/Sprühdesinfektion für alle medizinischen Oberflächen (z. B. Instrumentenschalen, Handstücke etc.). Leistungsstark. Materialschonend. Wirtschaftlich.

Anwendung

Bechtozid sensitive unverdünnt auf ein fusselfreies Einmaltuch oder direkt auf die zu desinfizierende Oberfläche sprühen und vollständig einreiben. Auf vollflächige Benetzung achten. Kein Nachwischen erforderlich. Geeignet für das medizinische Inventar, z.B. Möbel, Schwebetische, Unit- und Türgriffe, sanitäre Einrichtungen sowie Hand- und Winkelstücke. Bei empfindlichen Materialien (z.B. Acrylglas/Sitzpolster) vorab auf Verträglichkeit testen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 1 Minute (EN 13727/13624)
- wirkt tuberkulozid (M. terrae) in 5 Minuten unter hoher organischer Belastung (EN 14348)
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in 1 Minute (EN 14476)
- getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 4/2015) und gemeldet für die Listung bei der VAH
- quatfrei – verhindert Atemwegsreizungen
- mit deutlich geringerem Alkoholinhalt (< 30%)
- geeignet für Kunststoffoberflächen
- weniger belastend für Mensch und Umwelt
- neutral und mit frischem Lemonduft
- pH-Wert: <10,0



Zusammensetzung

100 g Bechtozid sensitive enthält:
< 30 g Ethanol

Haltbarkeit

30 Monate

Lieferform

REF563L Sprühflasche mit 1 Liter Fertiglösung, lemon
REF563N Sprühflasche mit 1 Liter Fertiglösung, neutral
REF563.5L Kanister mit 5 Liter Fertiglösung, lemon
REF563.5N Kanister mit 5 Liter Fertiglösung, neutral
REF563.10L Kanister mit 10 Liter Fertiglösung, lemon
REF563.10N Kanister mit 10 Liter Fertiglösung, neutral

Zubehör

REF 567.5 Dosierpumpe für 5 Liter Kanister
REF 567.10 Dosierpumpe für 10 Liter Kanister
REF 544.SP Sprühkopf für 1 Liter Flasche
REF 567.51 Ausgießer für 5 und 10 Liter Kanister



Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax: +49 781 60586-0
www.becht-online.de

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,
EG-Zertifikat: G1 17 09 49628 010,
TÜV SÜD Product Service GmbH,
München