

## Bechtozid soft

### Fertiglösung

#### Anwendungsbereich

Sprühschaum zur Desinfektion und Reinigung alkoholempfindlicher Medizinprodukte, z.B. Oberflächen von Behandlungstühlen (Leder und Kunstleder), Acryl- und Plexiglas. Besonders geeignet für die optimale Hygiene bei Patientenwechsel.

#### Anwendung

Bechtozid soft auf die kontaminierte Oberfläche sprühen, einwirken lassen und anschließend abwischen. Darauf achten, dass keine Flüssigkeitsrückstände auf den Flächen zurückbleiben und der Patient nur auf trockenen Polstern Platz nimmt. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Durch Drehen des Sprühkopfes ist die alternative Verwendung zum Sprühen oder zum Aufbringen der Lösung als Schaum möglich. Wir empfehlen die Anwendung als Sprühschaum, da keine Aerosolbildung beim Versprühen.

#### Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 1 Minute (EN 13727/13624)
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in 1 Minute (EN 14476)
- getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 4/2015) und gelistet bei der VAH
- phenol- und aldehydfrei
- biologisch abbaubar
- pH-Wert: <10,0
- ohne Alkohole und Aerosole
- ohne Zusatz von Farb- und Duftstoffen



#### Zusammensetzung

100 g Bechtozid soft enthalten:

- 250 mg Benzyl-C12-C16-alkyldimethyl-Chlorid
- 250 mg Didecyldimethylammoniumchlorid
- 250 mg C12-C14-(ethylphenyl)methyl]di-methyl- Chlorid

#### Haltbarkeit

30 Monate

#### Lieferform

- REF 537** Flasche mit 1 Liter gebrauchsfertiger Lösung, wiederbefüllbar, mit Duo-Sprühkopf
- REF 537.5** Kanister mit 5 Liter gebrauchsfertiger Lösung
- REF 537.10** Kanister mit 10 Liter gebrauchsfertiger Lösung

#### Zubehör

- REF 537.SP** Duo-Sprühkopf für 1 Liter Flasche
- REF 567.5** Ausgießer für 5 und 10 Liter Kanister
- REF 567.51** Ausgießer für 5 und 10 Liter Kanister



#### Hersteller

Alfred Becht GmbH  
Carl-Zeiss-Str. 16  
D-77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 60586-0  
Fax: +49 781 60586-40  
www.becht-online.de

#### Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,  
EG-Zertifikat: G1 17 09 49628 010,  
TÜV SÜD Product Service GmbH,  
München