

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zweckbestimmung

Löffelmaterial

Verwendung

Nur für den dentalen Gebrauch!

Beschreibung

- individuelle Abformlöffel
- individuelle Basisplatten für:
 - Wachswälle
 - intraorale Registriergeräte
 - Zahnaufstellung mit Wachs
- Herstellung von individuellen Frontzahnführungstellern (z.B. im Stratos®)

Technische Daten

Farbe: gelb

Indikationen

Zum Einsatz bei der Therapie bei partieller oder totaler Zahnlosigkeit.

Kontraindikationen

Bei erwiesener Allergie gegen Inhaltsstoffe von SR Ivolen

Verwendungsbeschränkungen

- Darf nicht im Munde verarbeitet werden
- Nicht geeignet für Alginat- und Hydrokolloide.
- Eine Wiederaufbereitung des Produktes ist nicht vorgesehen!




Nebenwirkungen

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Zusammensetzung

- Pulver: Poly(methacrylat)-Copolymer, Poly(methylmethacrylat), Calciumcarbonat, Poly(ethylmethacrylat), enthält Dibenzoylperoxid
- Flüssigkeit: Methylmethacrylat, Paraffinöl

Anwendung

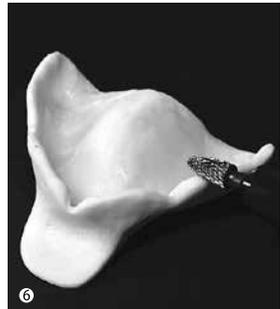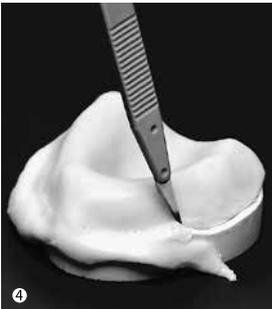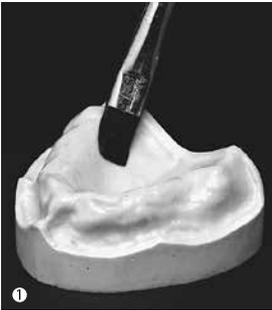

1. Nach dem Ausblocken von Unterschnittzonen das Model wässern und mit Ivoclar Vivadent Separating Fluid isolieren.
2. Pulver und Flüssigkeit nach Vorschrift dosieren: 20 g SR Ivolen Pulver, 6 ml SR Ivolen Flüssigkeit. Im Mischbecher gut durchspateln, bis sich die Mischung aus dem Gefäss löst. Für einige Sekunden von Hand kräftig durchkneten
3. SR Ivolen kann, ohne zu kleben, unmittelbar modelliert werden oder zwischen zwei Kunststoff-Folien mit Hilfe des Handrollers zu einer gleichmässigen Stärke ausgewalzt werden.
4. SR Ivolen auf dem Modell adaptieren, mit einem geeigneten Instrument zuschneiden und Überschuss entfernen.
5. Der Überschuss kann zum Modellieren und Ansetzen eines Löffelgriffes verwendet werden.
6. Nach einer rund 7-minütigen Aushärtung können die Ränder mit Hilfe von Fräsen o.ä. bearbeitet werden. Falls gewünscht, kann SR Ivolen auch poliert werden.

Sicherheitshinweise

- Bei schwerwiegenden Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sind, wenden Sie sich an Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, Website: www.ivoclarvivadent.com und Ihre zuständige Gesundheitsbehörde.
- Die aktuelle Gebrauchsinformation ist auf der Website der Ivoclar Vivadent AG im Downloadcenter hinterlegt (www.ivoclarvivadent.com).

Warnhinweise

- Monomer enthält Methylmethacrylat (MMA)
- MMA ist reizend und leicht entzündlich (Flammpunkt: +10°C)
- MMA reizt Augen, Atmungsorgane und Haut
- Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich
- Hautkontakt mit Monomer und unangehärtetem Material vermeiden. Handelsübliche medizinische Handschuhe bieten keinen Schutz gegen den sensibilisierenden Effekt von Methacrylaten.
- Dämpfe nicht einatmen
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
- Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen
- Schleifstaub während der Ausarbeitung nicht einatmen - Absauganlage und Mundschutz verwenden

Entsorgungshinweise

- Restbestände sind gemäss den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Lager- und Aufbewahrungshinweise


- Lagertemperatur 2–28 °C
- Produkt nach Ablauf nicht mehr verwenden
- Verfalldatum: siehe Hinweis auf Verpackung

Zusätzliche Informationen

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Bildbeschreibung:

Mischungsverhältnis:
Pulver 20 g
Flüssigkeit 6 ml

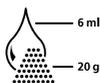

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemässer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.