

***Cavidex® entfernt zuverlässig Fett und Feuchtigkeit und ermöglicht dadurch eine sichere Haftung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien.***

## ***Anwendungsbereiche***

Reinigungslösung für Kavitäten und Dentalpräparationen.

## ***Applikation***

Ein Wattlepellet mit Cavidex® tränken, abstreifen und damit die Kavität bzw. den Zahnstumpf säubern. 10 Sekunden warten, bis die Flüssigkeit verdunstet ist.

## ***Zur Beachtung***

Cavidex® ist leichtentzündlich und reizt die Augen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Nur für den dentalen Gebrauch durch geschultes Fachpersonal.

## ***Lagerung***



# DETAX



GmbH & Co. KG  
Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany  
Telefon: 072 43/510-0 · Fax: 072 43/510-100  
www.detax.de · post@detax.de



Made in  
Germany

08/2018